

Humphrey Field Analyzer Ili-Serie (Modelle 720i, 740i, 745i, 750i)

Herausnahme der HFA-Perimeter

Begründung für die Herausnahme der HFA-Perimeter aus der Liste der für die Gutachten-relevante Gesichtsfelduntersuchung zugelassenen kinetischen Perimeter

Für die Gutachten-relevante Untersuchung des Gesichtsfeldes mit kinetischen Messmarken sind - in Übereinstimmung mit der Verkehrskommission der DOG und der DOG-Kommission für die Qualitätssicherung sinnesphysiologischer Untersuchungsverfahren und Geräte (QSS) - nur das GOLDMANN-Perimeter sowie davon abgeleitete Perimeter mit einer ***vom Untersucher frei wählbaren, direkt manuell geführten Stimulusbewegung*** zugelassen. Neuere automatische Perimeter erhalten diese Zulassung auch, sofern diese ebenfalls eine frei geführte Stimulusbewegung zulassen, welche der direkt manuell geführten Stimulusbewegung des GOLDMANN-Perimeters vergleichbar ist.

Nach dem Kenntnisstand der QSS-Kommission erfüllen die aktuell auf dem Markt befindlichen (HUMPHREY-)Perimeter der Fa. Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH, Oberkochen/D, die vorgenannten Anforderungen nicht und werden daher aus der QSS-Auflistung derartiger Geräte mit sofortiger Wirkung gestrichen.

Hersteller/ Vertrieb	Carl Zeiss Jena GmbH	
Umfeld/ Hintergrund	Abstand	30 cm
	Form	Halbkugel, außerhalb 30° asphärisch
	Leuchtdichte	10 cd/m ²
	Farbe(n)	Weiß
Reizmarke	Darbietung	Projektion
	Mechanik	Drehspiegel
	Bewegung mittels	Schrittmotor
	Pos.-Genauigkeit	Gem. ISO-Norm, nicht bekannt
	Max. Exzentrizität	90°
	Größen	Goldmann I - V
	Farbe(n)	Weiß, optional Farbe
	Leuchtdichtebereich	0,32 - 3200 cd/ m ² (min./max.)
	Kontrastbereich	1 - 319, bezogen auf L = 10 cd/m ²
	LUE-Bereich	1 bis 0,0032, bezogen auf L = 10 cd/m ²
Kontrollen	Leuchtdichte-Abstufung	-
	Fixation visuell	Beobachtungsmonitor
	Fixation automatisch	Nach Heijl-Krakau über Blinden Fleck
Kopfpositionierung	Zentrierung	Mittels Kinnstütze
	Abstand	Mittels Kinnstütze
Ergebnis/Daten	Dokumentation	Automat. Befundausdruck
	Drucker	Ja
	Elektron. Speicherung	Ja, Festplatte oder Diskette
Bemerkungen		

Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.

[zur Liste der kinetischen Perimeter](#)
[zur Hauptseite Kinetische Perimetrie](#)
[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - **QSS**

Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php?id=kp_ger_humphrey

Last update: **2025/08/31 19:41**

